

WYKONANIE TELETRANSMISJI

1. Włączamy defibrylator
2. Naciskamy przycisk TRANSMISJA na klawiaturze po lewej stronie
3. Z menu na wyświetlaczu wybieramy odpowiednie Miejsce (HIPOTERMIA) i typ raportu (WSZYSTKO)
4. Wykonujemy transmisję do miejsca docelowego, poprzez wybranie opcji „PRZEŚLIJ”

Prześlij	
Raport	Wszystko
Miejsce	HIPOTERMIA
Anuluj...	

5. Kontaktujemy się telefonicznie z miejscem odbiorczym – koordynatorem ds. hipotermii tel. **501 039 462**

WYKONANIE TELETRANSMISJI Z ARCHIWUM

1. Włączamy defibrylator
2. Naciskamy przycisk OPCJE na klawiaturze po prawej stronie
3. Z menu na wyświetlaczu wybieramy opcję „ARCHIWUM”

Pacjent...	Archiwum...
Stymulacja...	Drukuj...
Data/Godz...	Wywołaj tekst...
Głośność alarmu...	

4. Potwierdzamy wejście do trybu ARCHIWUM poprzez wybranie opcji "TAK"

Wejść do Archiwum pacjentów? To zakończy monitorowanie i zapis danych o pacjencie	
Tak	Nie

5. Wybieramy opcję „PRZEŚLIJ DANE”

Prześlij dane...	Edytuj...
Drukuj...	Usuń...

6. Wybieramy konkretnego pacjenta z listy (po wybraniu pola „PACJENT” pojawia się lista pacjentów w Archiwum), wybieramy RAPORT „WSZYSTKO” oraz miejsce docelowe „HIPOTERMIA”
7. Wykonujemy transmisję do miejsca docelowego, poprzez wybranie opcji „PRZEŚLIJ”

Prześlij	
Pacjent	KOWALSKI, JAN
Raport	Wszystko
Miejsce	HIPOTERMIA
Połączenia	(Brak połączenia)
Anuluj...	

8. Kontaktujemy się z miejscem odbiorczym – koordynatorem ds. hipotermii tel. **501 039 462** i wykonujemy próbną transmisję do nowego miejsca.